


# Montageanleitung Kopfteilverlängerung (KTV) für Stryker Power-PRO 2



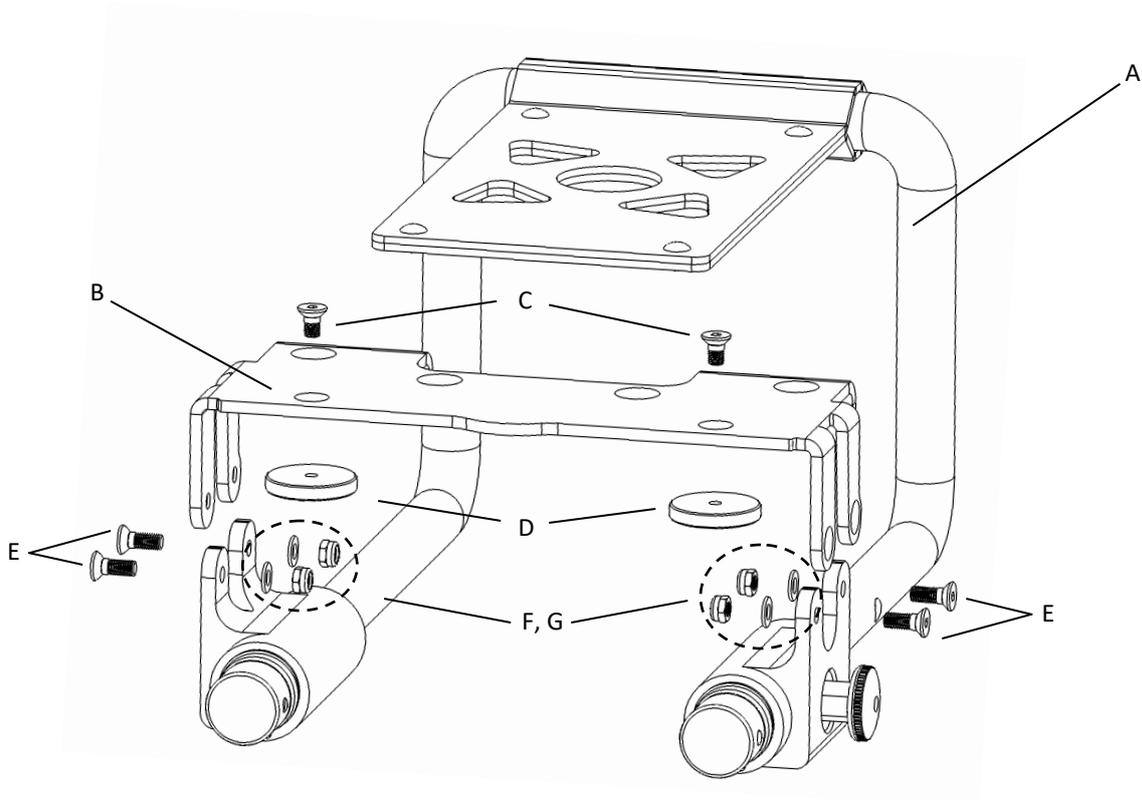


## 1 Lieferumfang

Bezeichnung	Artikel	Anzahl
A	KTV-Gestänge	1
B	KTV-Befestigungsmodul	1
C	Senkkopfschraube mit Innensechskant M5 x 10	2
D	Gewindescheibe M5	2
E	Senkkopfschraube mit Innensechskant M5 x 14	4
F	Sechskantmutter mit Sicherungsring M5	4
G	Unterlegscheibe M5	4






## 2 Benötigte Werkzeuge/Material

Inbusschlüssel Gr. 3
Maulschlüssel Gr. 8
Schlitzschraubendreher
Schraubensicherung mittelfest

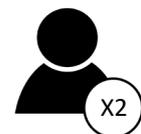


### 3 Montage


#### Montageschritt 1: Aufstecken und Befestigen des KTV-Befestigungsmoduls

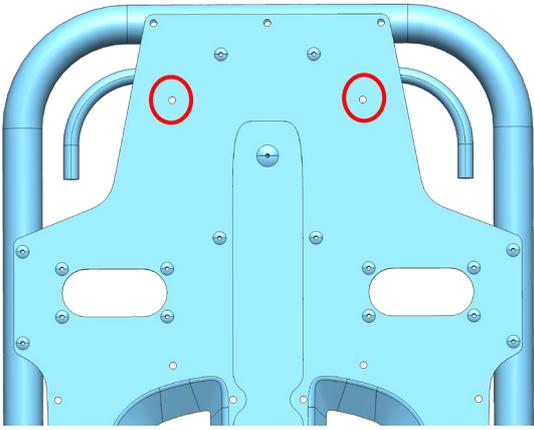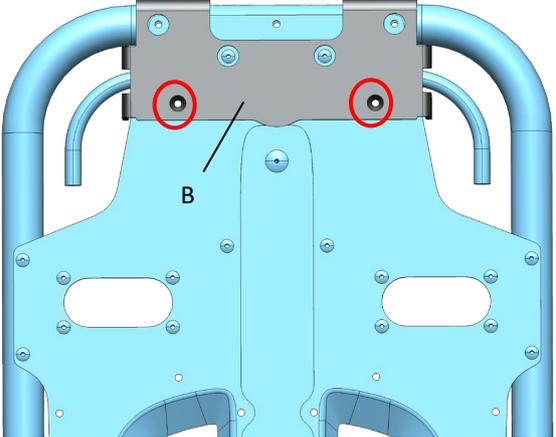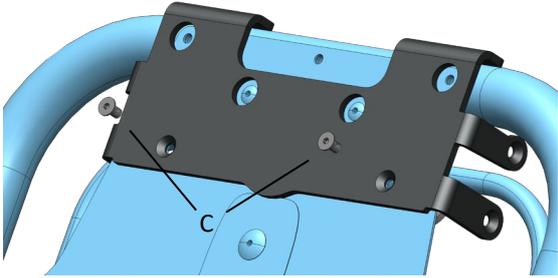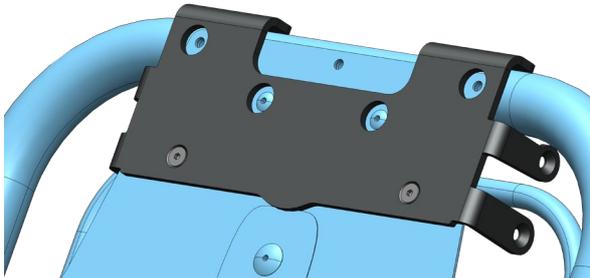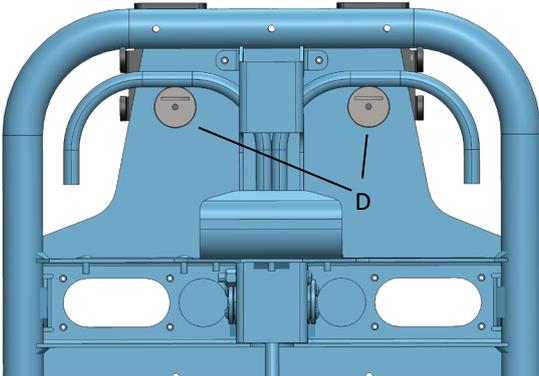
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufstecken des KTV-Befestigungsmoduls (B) auf die Rückenlehne der Trage. Dabei ist darauf zu achten, dass die zwei Bohrungen des Befestigungsmoduls genau auf den Bohrungen der Trage (siehe rote Kreise) zu liegen kommen.</li> </ul>	
	
	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hindurchführen der beiden Senkkopfschrauben mit Innensechskant M5 x 10 (C) und je 2 Tropfen <b>mittelfeste Schraubensicherung</b> auf die Schraubenspitzen aufbringen.</li> <li>• Gewindescheiben (D) von der Unterseite per Hand aufschrauben.</li> <li>• Zum Festziehen: Inbusschlüssel für die Schrauben (C) und Schlitzschraubendreher für die Gewindescheiben (D) verwenden und handfest anziehen.</li> </ul>	

Montageschritt 2: Montage des KTV-Gestänges am KTV-Befestigungsmodul

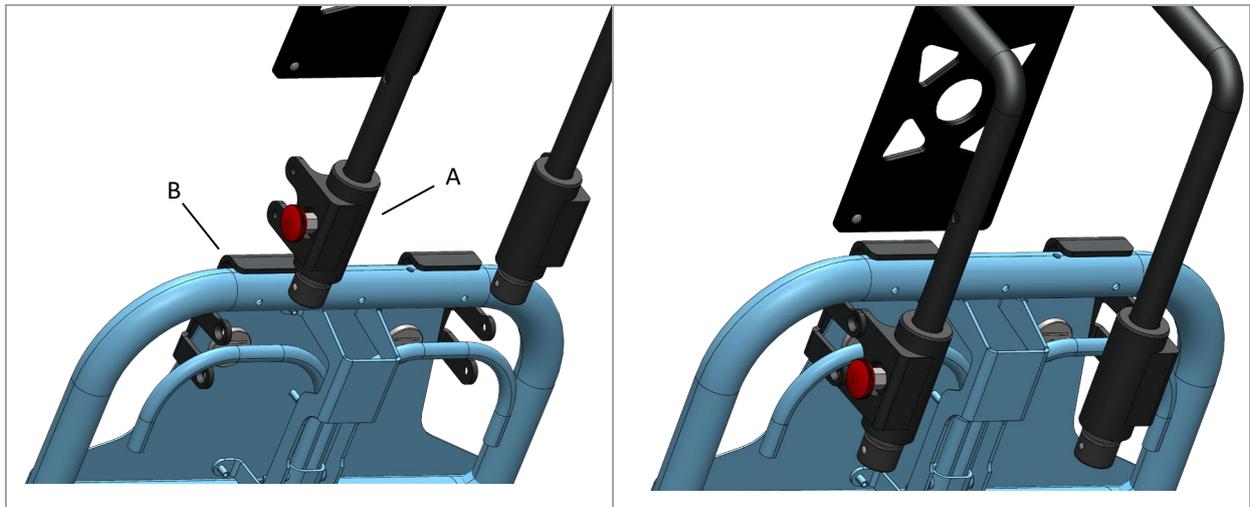

- Einsetzen des KTV-Gestänges (A) an die Innenseiten des KTV-Befestigungsmoduls (B) - Laschen des Gestänges innen und Laschen des Befestigungsmoduls außen.

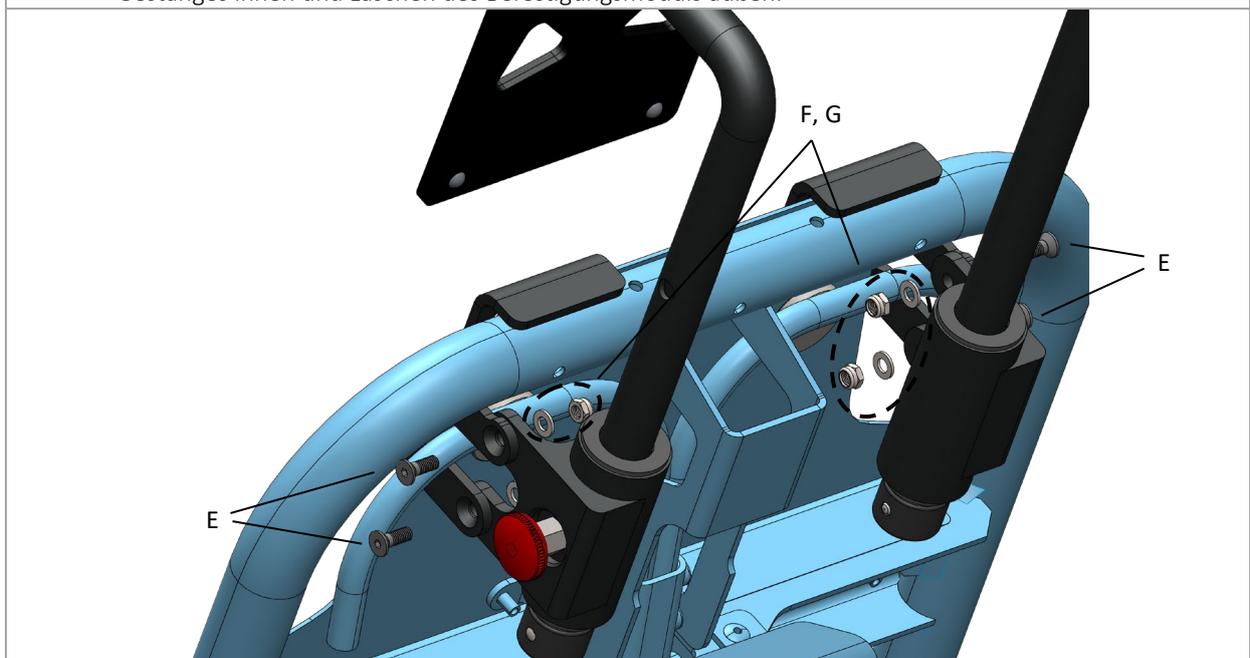

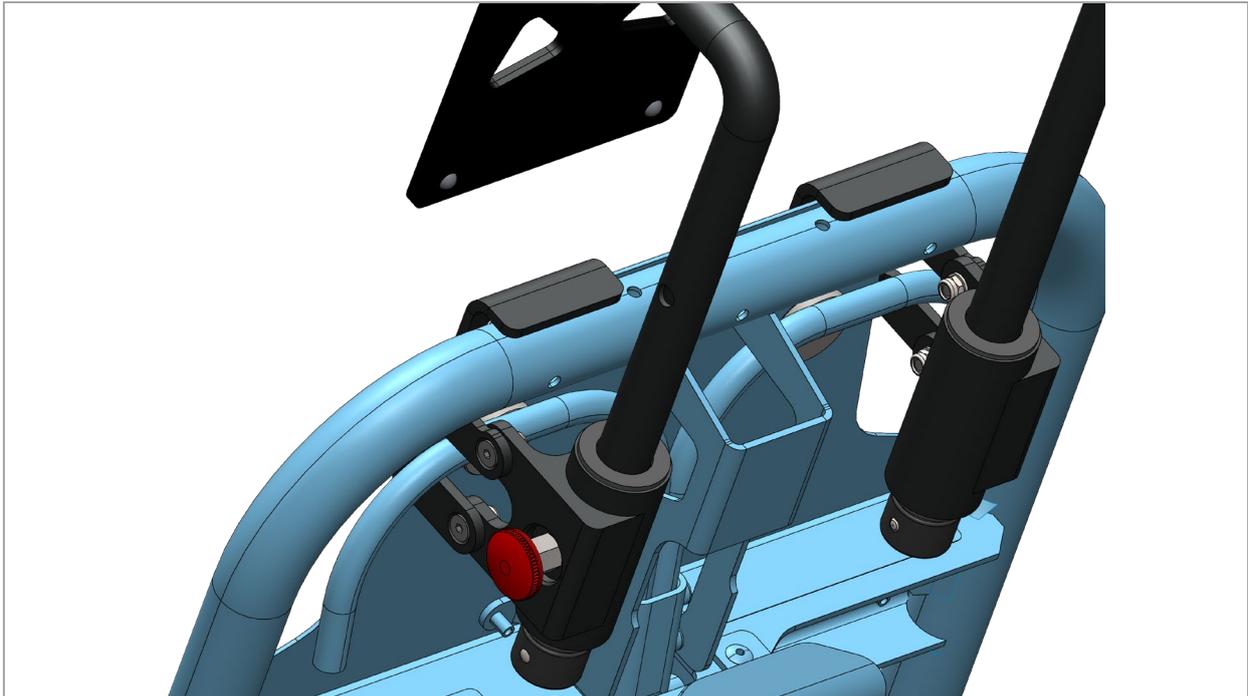

- Die vier Senkkopfschrauben mit Innensechskant M5 x 14 (E) von außen durch die Bohrungen in den Laschen von KTV-Befestigungsmodul und KTV-Gestänge stecken.
- Unterlegscheiben (G) auf die Senkkopfschrauben (E) aufschieben und anschließend die Sechskantmuttern mit Sicherungsring (F) aufschrauben.



Bei der Montage der selbstsichernden Sechskantmuttern (F) ist darauf zu achten, dass der Kunststoffeinsatz (blauer Sicherungsring) nach außen zeigt.

Artikelnummer/-n	17216
Letzte Änderung am	11.01.2024
Letzte Änderung durch	Stefan Fischer
Version des Dokuments	1.1